


# The Jaw Elevation Device

## 下顎提升裝置組

讓呼吸道保持在開放及暢通狀態

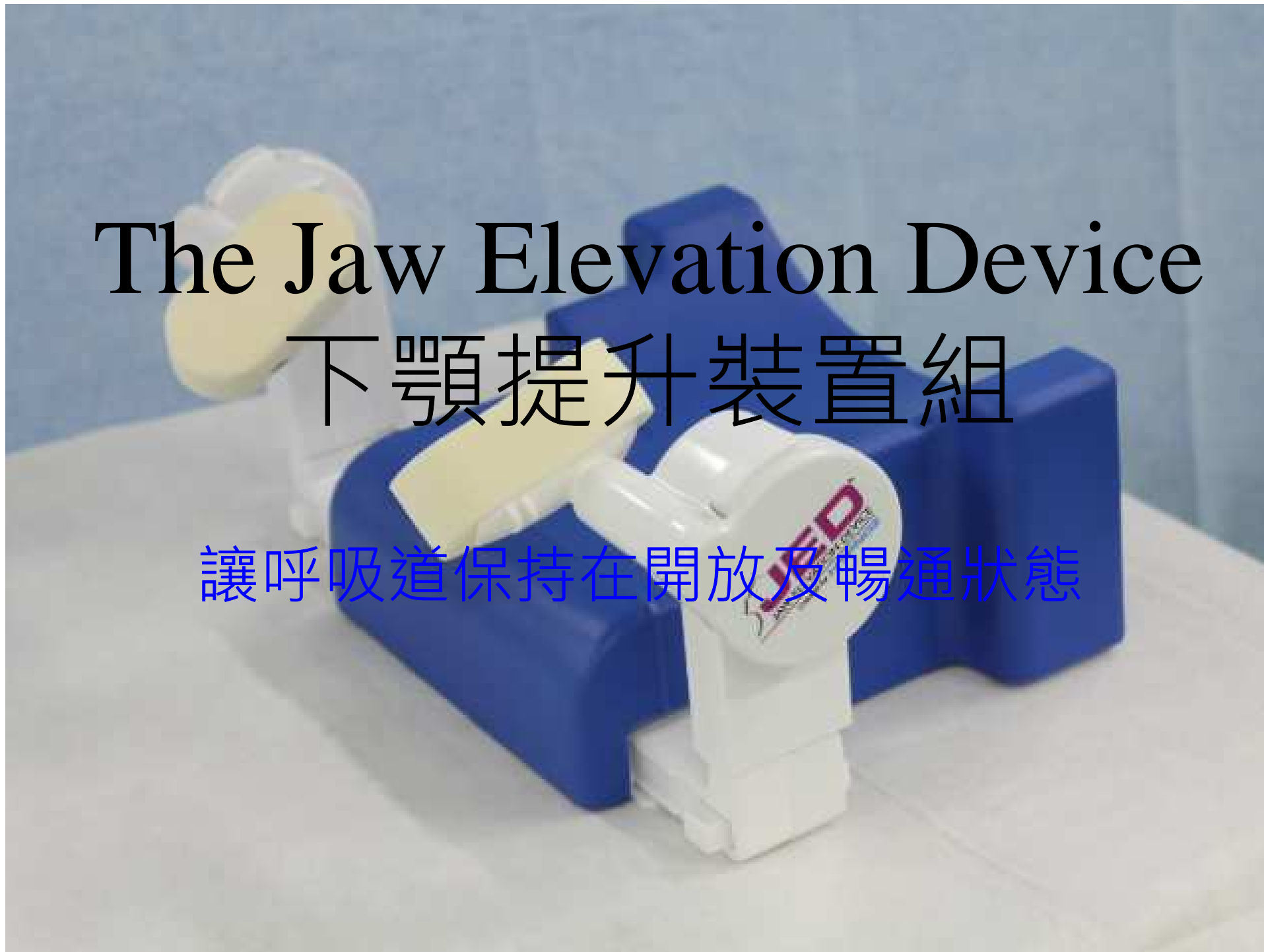


# 操作步驟

1. 將病人頭部放在頭枕最上方的中心,並讓病人的下唇與下方的對齊線成一直線




2.

將拋棄式下顎托杯(綠色右邊及紅色左邊)插入可重複使用的垂直懸臂(同樣是右邊綠色,左邊紅色)

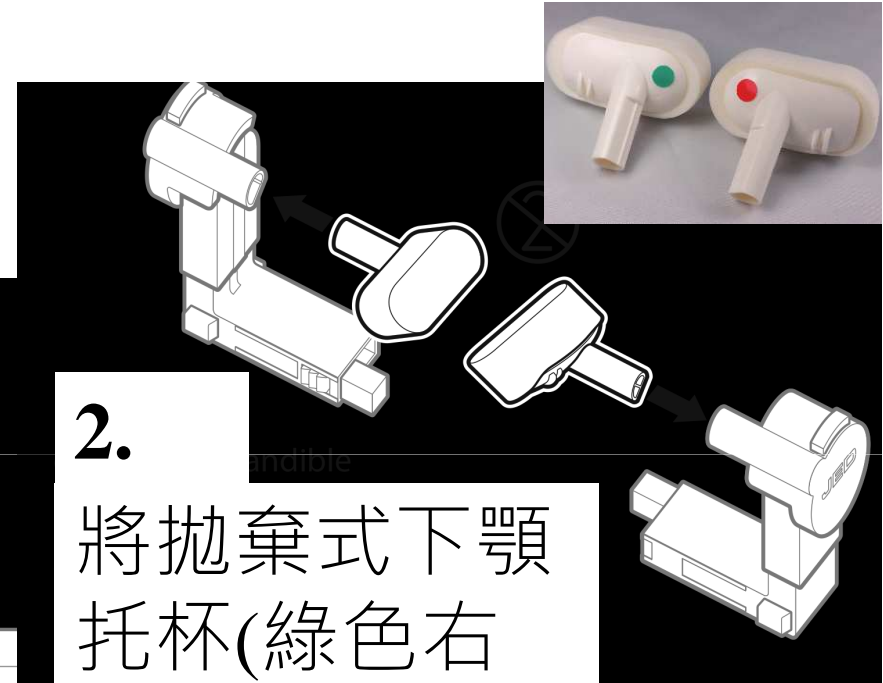


# 操作步驟

3. 將垂直懸臂(綠色右邊,紅色左邊)分別插入頭枕兩邊的基座

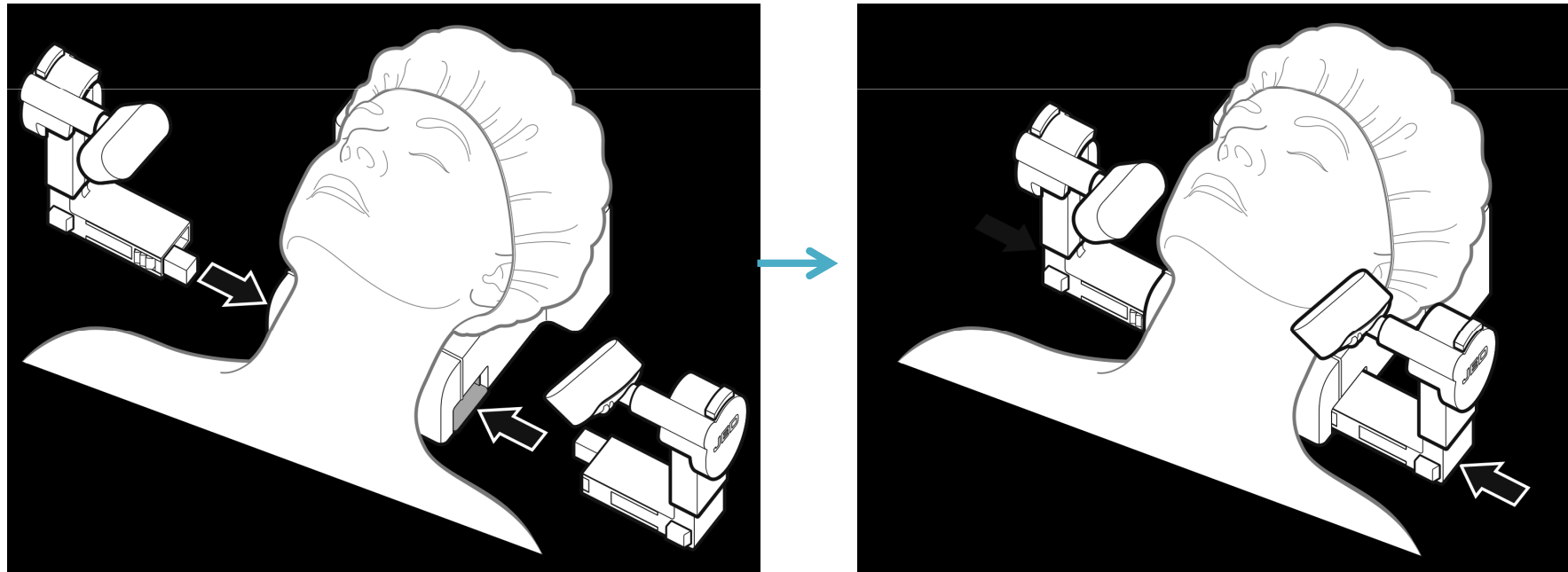


# 操作步驟

4. 同時按住兩邊垂直懸臂上方的旋轉按鈕(A)並將下顎托杯向前旋轉至最低位。

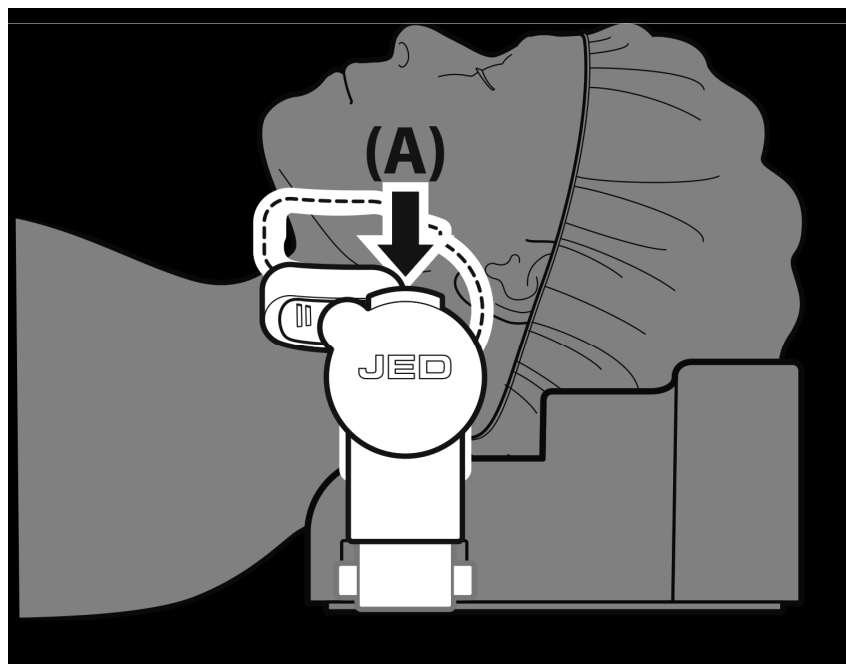

# 操作步驟



5. 當病人執行鎮靜後,將病人的頭部調整至嗅花位並經由胸部起伏或CO<sub>2</sub>的波形評估病人是在良好的呼吸狀態.用左手托住病人下巴並維持不變,以右手觸診右邊的下顎骨的角度.將垂直懸臂向內推至病人下顎骨的位置,然後將垂直懸臂向上滑動直到整個下顎托杯完全接觸下頷骨.

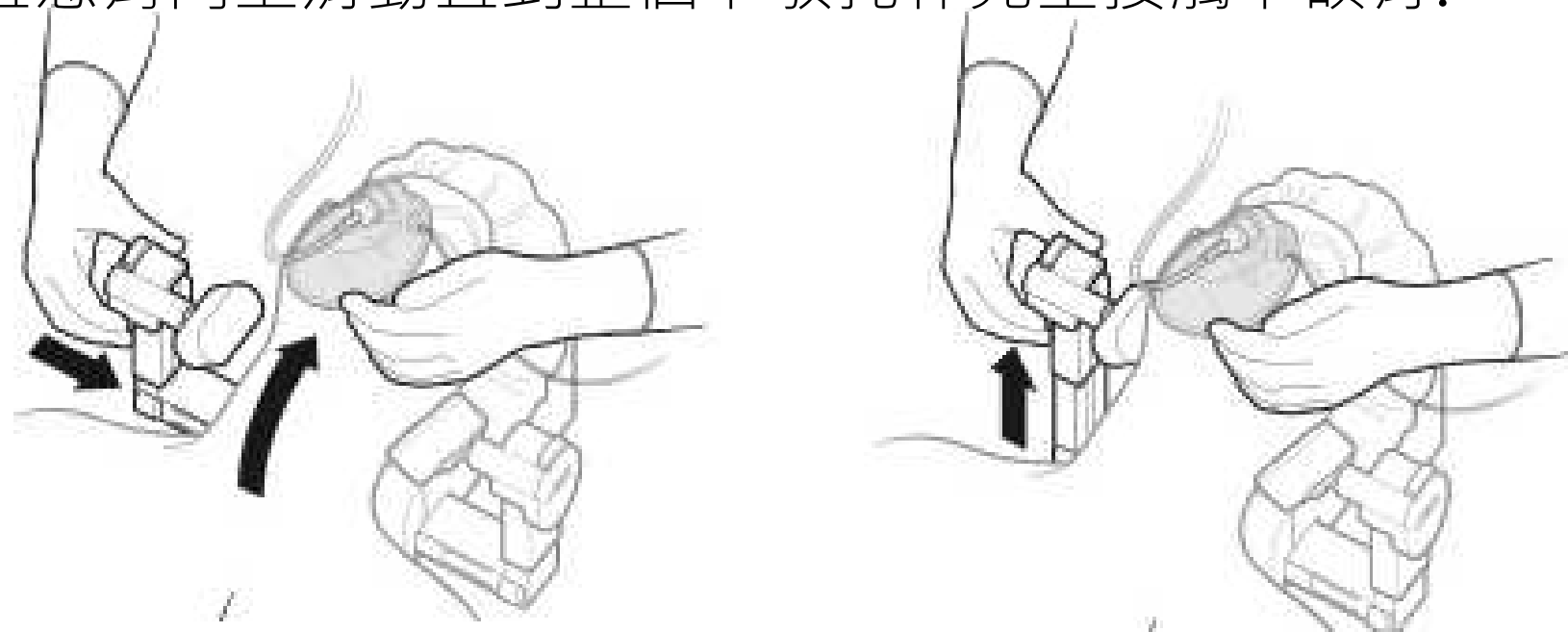

\* 當在執行步驟5-7時,千萬不要按壓按鈕(A) \*

# 操作步驟

6. 延續步驟5,左右手互換.用右手托住病人下巴並維持不變,以左手觸診左邊的下頷骨的角度.將垂直懸臂向內推至病人下顎骨的位置,然後將垂直懸臂向上滑動直到整個下顎托杯完全接觸下頷骨.

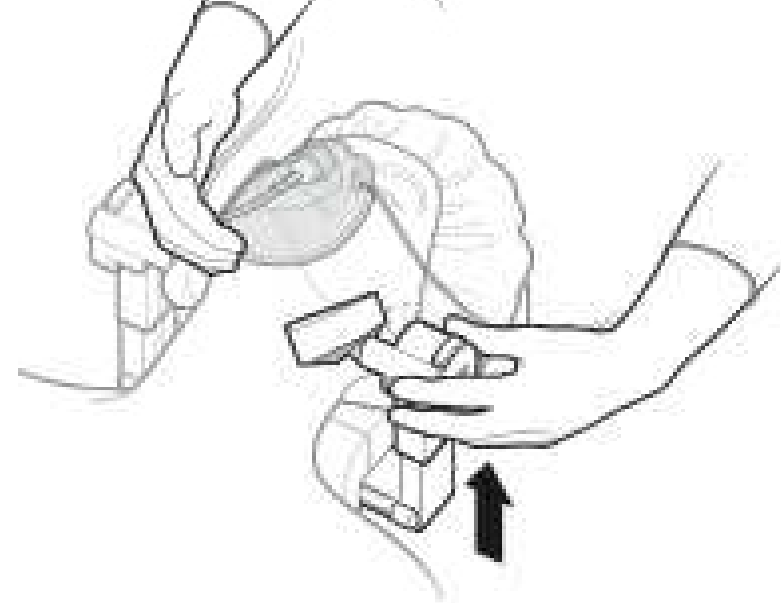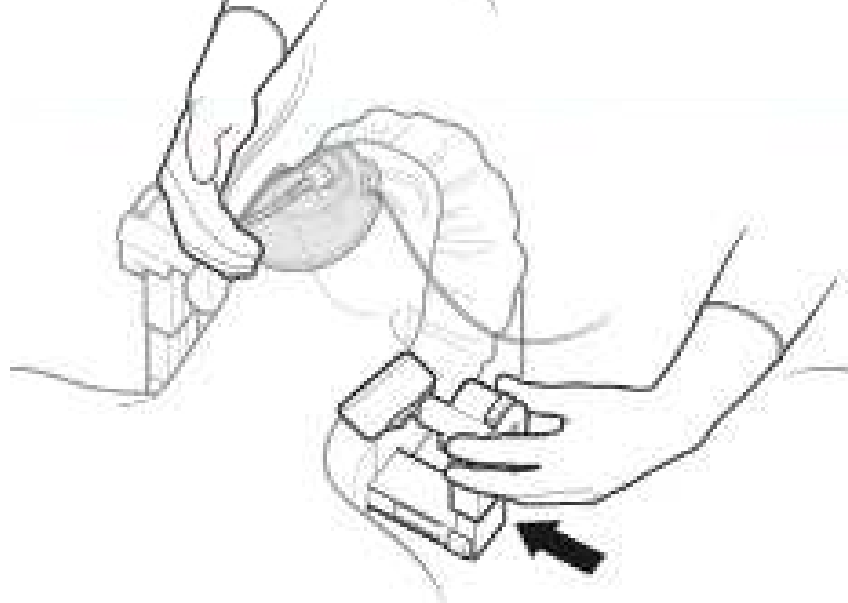


\* 當在執行步驟5-7時,千萬不要按壓按鈕(A) \*

# 操作步驟

**7.** 接下來,用雙手同時將下頷托杯向內旋轉讓病人的頭部向後仰及打開病人呼吸道.


在步驟 **8** 可按住旋轉盤上方的按鈕(A)來上下及前後調整垂直懸臂及下顎托杯

**8.** 為了達到完全打開呼吸道及減輕下頷骨的壓力,務必要讓下顎托杯的中心完全與下頷骨的角度密合.必要時可以重新調整頭枕,垂直懸臂,以達到呼吸道完全打開的目的.

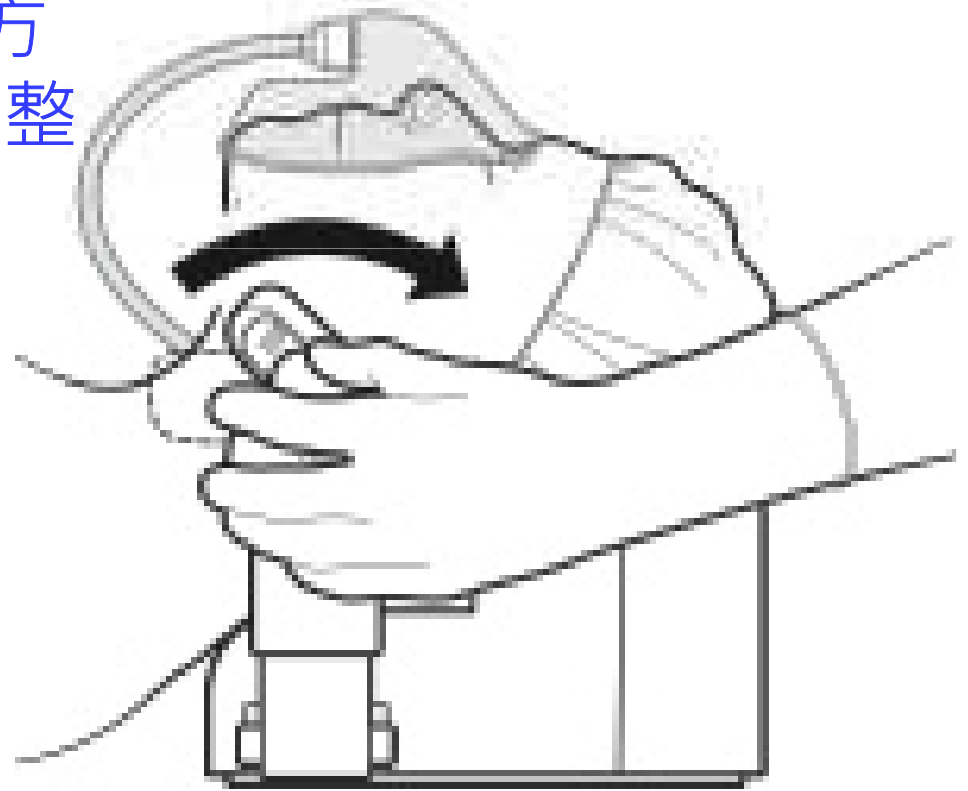

# 操作步驟


9. 使用提顎器的病人如同時也監視呼末二氧化碳(ETCO<sub>2</sub>),其取樣管可坎入下顎托杯(左右皆可)背面的溝槽以確保取樣管的通暢.

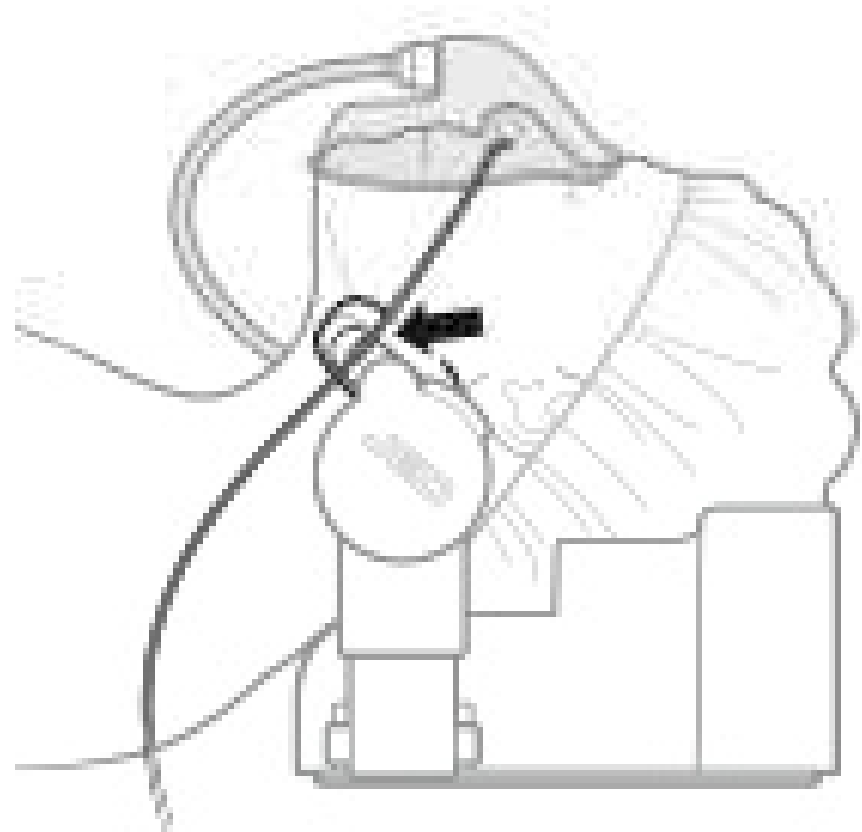



# 操作步驟

**10.** 使用後從病人身上移除：以雙手擠壓垂直懸臂底部的按鈕同時將垂直懸臂由頭枕向外抽出. 分離並銷毀下顎托杯.

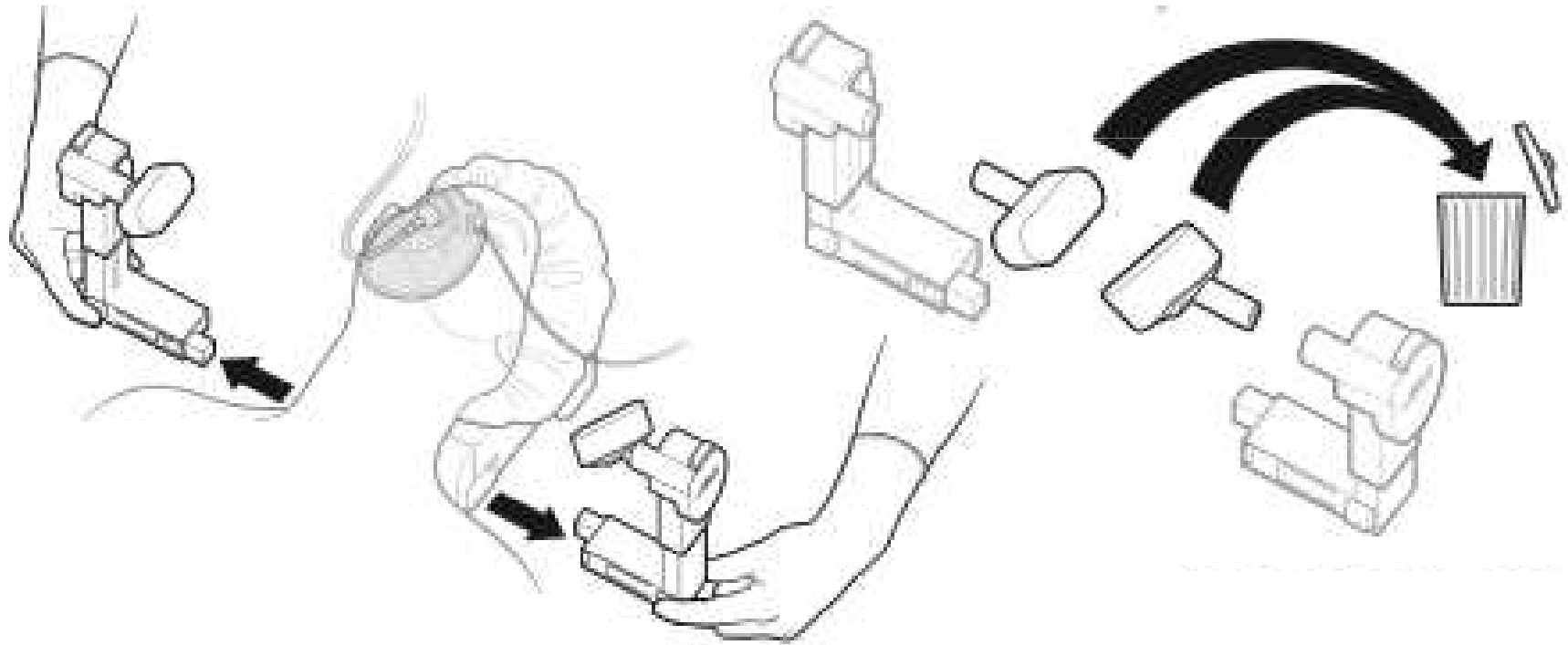

溫馨的提示：提顎器使用後可利用其背後的小孔懸掛起來

# 清潔

1. 使用清水,肥皂水或經過醫院認可的醋酸清洗髒污部分.
2. 使用高級消毒劑進行消毒,並確認使用前已完全乾燥.

注意：

- 請勿將**JED**的任何部件浸泡在清潔液中
- 請勿將**JED**的任何部件進行高溫高壓消毒.
- 下顎托杯組為拋棄式使用,請勿重複使用.

